

WCPA 临床躯体症状分类诊断 测评系统使用手册

2019.09

一、使用说明:

- 1、本手册仅适用于该测评系统的内测体验，如需正式使用，请与我们联系；联系人：周女士 18010522507；
- 2、该测评系统为网页操作系统，本手册以手机使用为例进行讲解，电脑操作与此一致；
- 3、测评报告可通过电脑登录系统进行打印；
- 4、本手册最终解释权归四川省西部精神医学协会所有。

二、使用步骤:

1、登录系统：扫描下方二维码或手机浏览器输入网址：

<https://diag.ligotop.com>;



2、点击登录进入“测评端”首页（系统默认用户名：100；密码：password）；

3、点击“添加测评”，填写新增测评人姓名、性别及年龄，点击“确认”；

4、查询找到新增测评人姓名，点击右侧“开始测评”；


5、根据引导完成“基础信息”、“测评引导”、“自我测评”及“医生测评”内容；

6、答题中途可暂停退出，暂停解锁码“0987”；在“测评端”首页找到对应名字可继续完成测评；

7、答题结束后，点击“完成”，输入“0987”即可返回“测评端”首页；

8、首页点击“诊断端”切换端口，查询找到已完成测评者姓名，点击右侧“查看结果”即可立即查看测评报告。

三、详细操作流程图

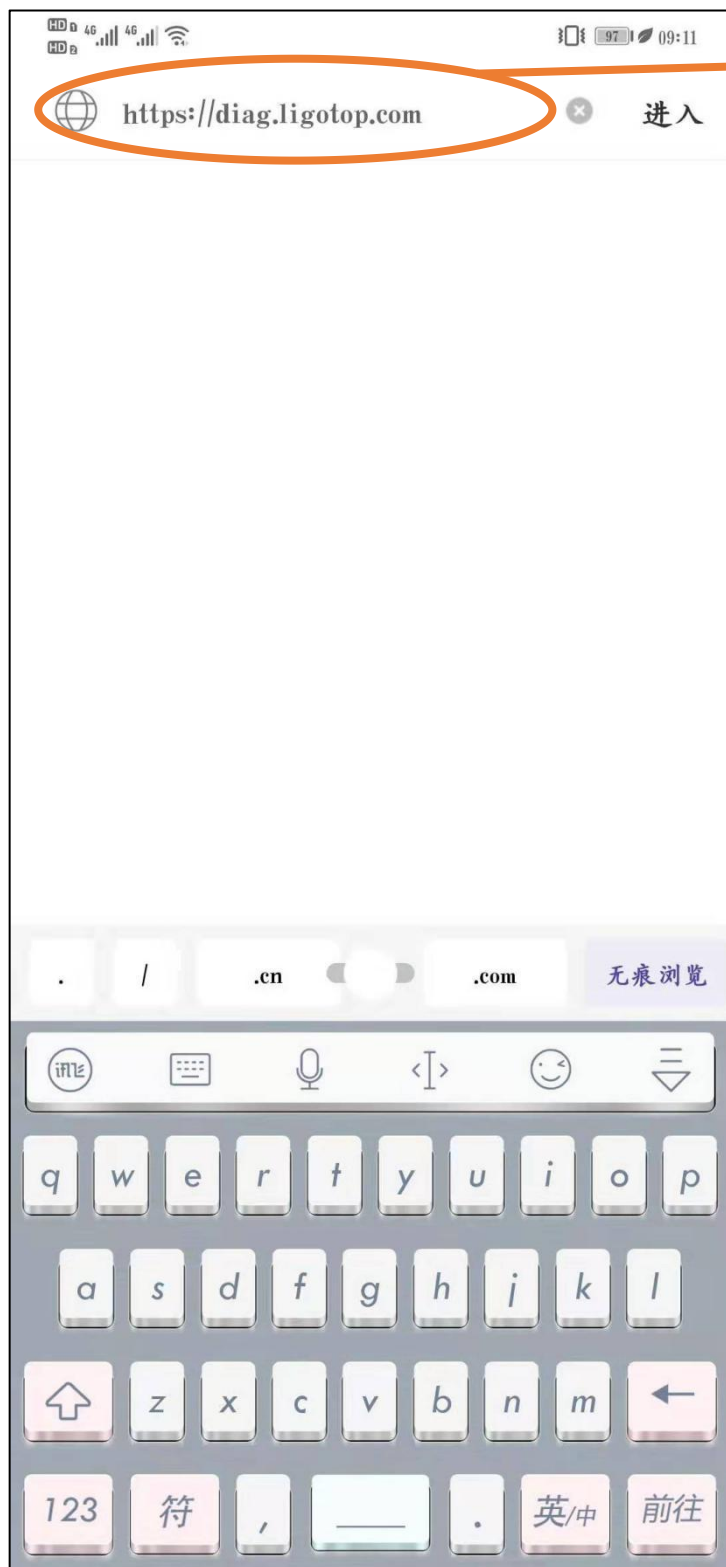

Step 1

浏览器输入
测评系统网
址或扫描文
中二维码



Step 2
输入默认用户名和
密码, 点击“登录”,
进入测评端首页



Step 3

添加测评人信息，
输入姓名、性别及
年龄，点击“确认”
返回“测评端”首
页



Step 4

找到新增姓名，点击“开始测评”

中国移动
中国电信

2.6%

基础信息 测评引导 自我测评 医生测评

* 姓名 莉莉 ✓

* 就诊号 wcpa_20 ✓

* 性别 男 女

* 年龄 28 ✓


手机号码

方便医生诊后回访，请留下您的电话号码

上一步 暂停测评 下一步


Step 5

完成基础信息内容，
点击下一步继续

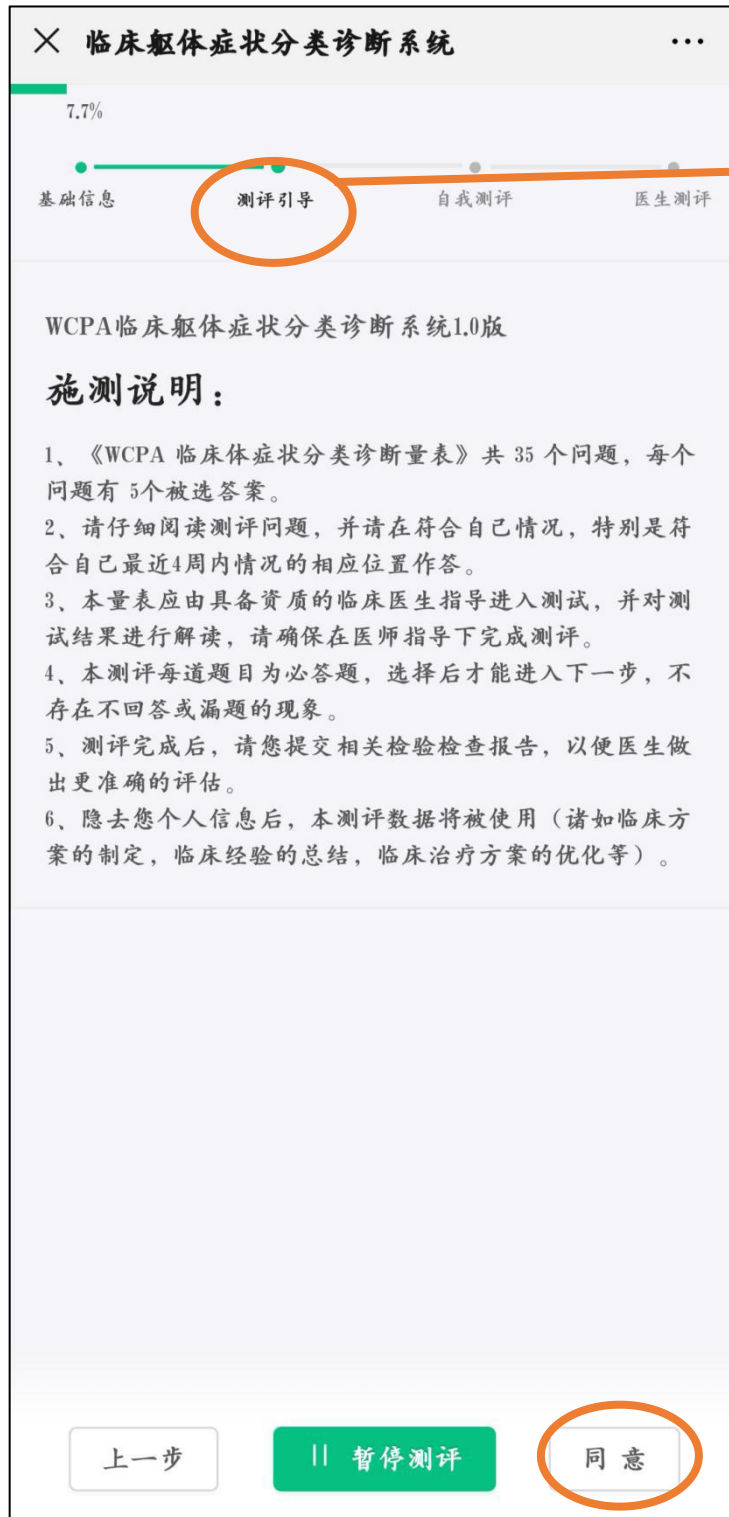

Step 6

阅读引导语，点击
“同意”进入下一步

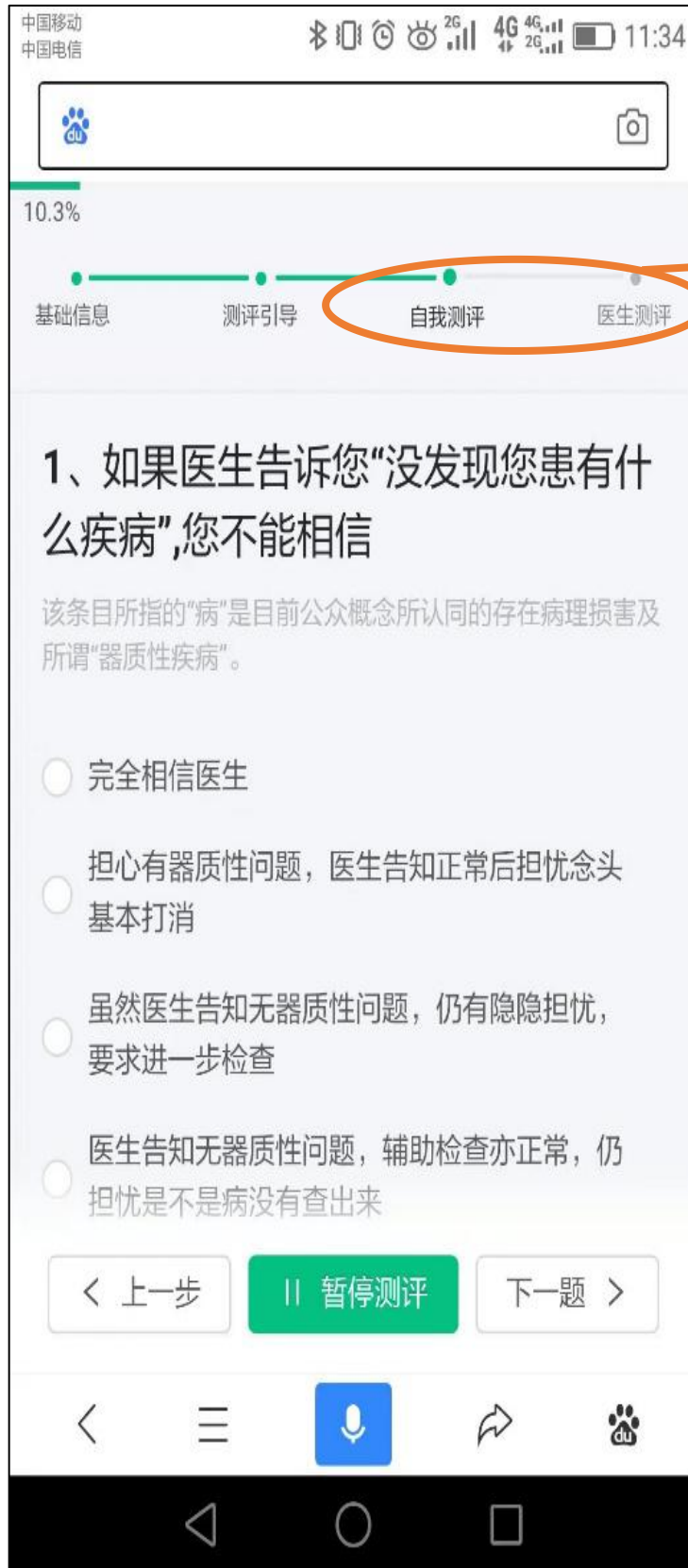

Step 7
开始答题，一共 35
道题，请勿空项



Step 8
答题结束后，点击
“返回”，输入
“0987”即可




Step 9

点击此处, 切换至
“诊断端”查看测
评报告




Step 10

找到对应名字，点击“查看结果”，即可查看测评报告

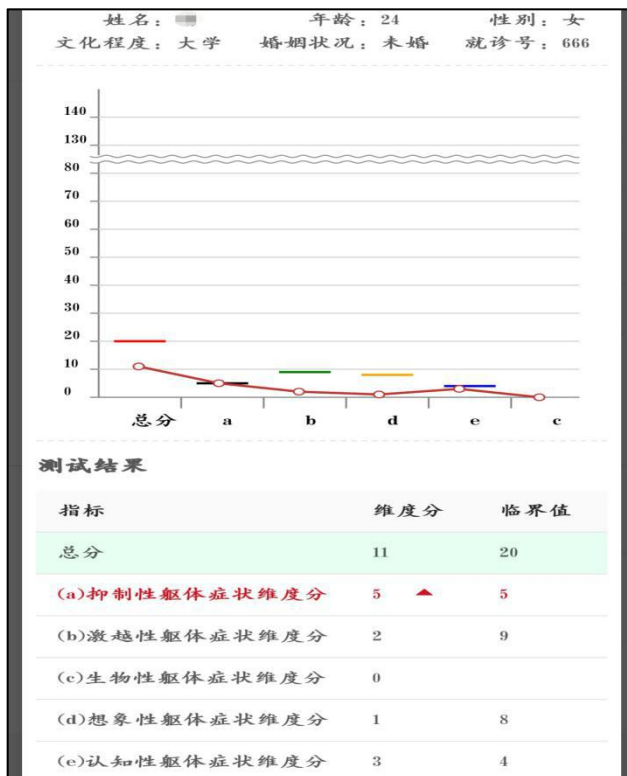

图为测评结果示意图，电脑登录时可打印报告

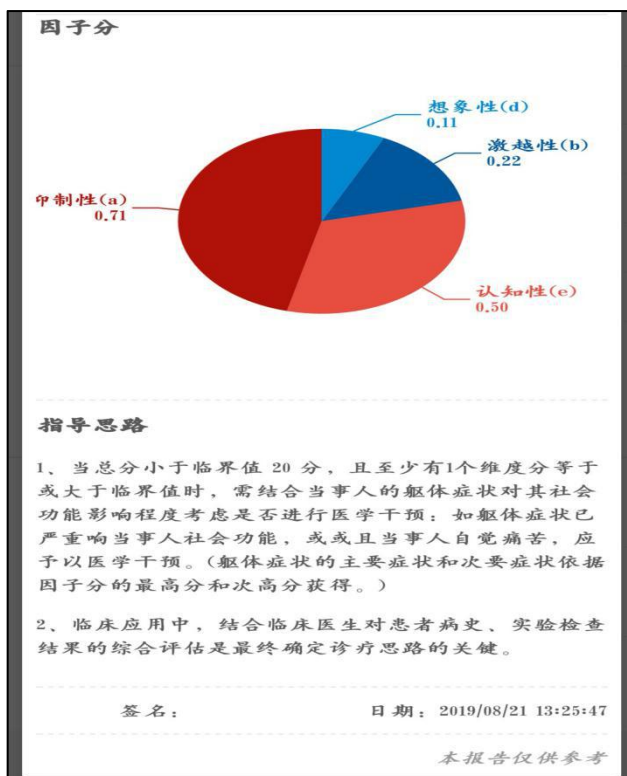

阅读结束，谢谢观看